

REINIGUNG ① ← 1 Min. Gesamtreinigung



1. Innenseiten und Rand des neuen oder restentleerten Spenders mit einem Reinigungstuch gründlich reinigen.



2. Deckelinnenseiten, Rand des Deckels, Innenflächen und Ränder der Entnahmeöffnung gründlich reinigen.



3. Deckelaußenseiten und Außenflächen des Spenders gründlich reinigen.



4. Feuchttuchspender und Deckel mindestens 10 Min. abtrocknen lassen, um eine vollständige Trocknung zu gewährleisten.

DESINFEKTION ② ← 1 Min. Wischdesinfektion



1. Innenseiten und Rand des Spenders mit einem mit alkoholischer Desinfektionslösung getränktem Tuch, z.B. medichem **Schnelldesinfektion Plus** oder **Flow Wipes Sensitive** gründlich abwischen.



2. Deckelinnenseiten, Rand des Deckels, Innenflächen und Ränder der Entnahmeöffnung gründlich abwischen.



3. Deckelaußenseiten und Außenflächen des Spenders gründlich abwischen.



4. Spender und Deckel vollständig abtrocknen lassen. Anschließend Feuchttuchspendensystem gem. Befüllanleitung mit medichem Desinfektionstüchern und medichem Desinfektionsschaum, medichem Wischdesinfektion oder medichem **Schnelldesinfektion Plus** befüllen.

Vor jeder Wiederbefüllung der Feuchttuchspender ist eine vorbeugende Reinigung und Desinfektion erforderlich. Zur Befüllung und Aufbereitung des Feuchttuchspenders und im Umgang mit Desinfektionsmitteln sind geltende Regeln des Personalschutzes zu beachten und geeignete Schutzausrüstung zu tragen (siehe TRBA250/ BGR 195; Infos unter (www.bgw-online.de))

Die VAH- Empfehlung zur Kontrolle kritischer Punkte bei der Anwendung von Tuchspendensystemen im Vorranksystem für die Flächendesinfektion¹ und die Mitteilung der VAH „Kontrollmaßnahmen bei der Anwendung von Tuchspendensystemen für die Flächendesinfektion in Abhängigkeit vom Risikoprofil“² sind zu beachten. Im Falle eines mikrobiologischen Befundes sind neben der Aufbereitung auch die Befüllung, Anwendung und ggf. weitere Parameter als mögliche Ursache in Betracht zu ziehen und zu überprüfen.

¹ Hyg Med 37. Jahrgang 2012, Mitteilung 3/2012 Empfehlung zur Kontrolle kritischer Punkte bei der Anwendung von Tuchspendensystemen im Vorranksystem für die Flächendesinfektion

² Hyg Med 38. Jahrgang 2013, Mitteilung 1/2013 Kontrollmaßnahmen bei der Anwendung von Tuchspendensystemen für die Flächendesinfektion in Abhängigkeit vom Risikoprofil