



Desinfektionsschaum

Alkoholfreies Schnelldesinfektionsmittel



Produktbeschreibung

medichem Desinfektionsschaum ist ein alkoholfreies, gebrauchsfertiges Präparat zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. Besonders für alkoholempfindliche Medizinprodukte und Flächen, auch für Acrylglas geeignet. Auf der Basis von quarternären Ammoniumverbindungen.

medichem Desinfektionsschaum enthält keine Alkohole, Aldehyde und Phenole und ist außerdem geruchsneutral.

Anwendungsgebiete

Gem. *Biozidprodukte-Verordnung (BPR)*: Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem medizinischen Inventar und Flächen aller Art.

Gem. *EU-Medizinproduktverordnung*: Schnelldesinfektion und Reinigung von nichtinvasiven alkoholempfindlichen Medizinprodukten.

Anwendung und Hinweise

Flächen mit **medichem Desinfektionsschaum** bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.

medichem Desinfektionsschaum kann als Wischdesinfektion oder Schaum-Sprühapplikation verwendet werden.

Medizinprodukte, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit dem Körper in Kontakt kommen, nach Ablauf der Einwirkzeit 15 Sek. unter fließendem Wasser geeigneter Qualität spülen.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten			30 Sek.	1 Min.	2 Min.
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid *	VAH **/ EN 16615	hohe Belastung		✓	
Behüllte Viren					
begrenzt viruzid	EN 14476	hohe und niedrige Belastung	✓		
	EN 16777	hohe und niedrige Belastung	✓		
Ergänzenede Prüfergebnisse					
wirksam gegen Papova/SV40 - Viren	EN 14476	hohe Belastung			✓
wirksam gegen Rotaviren	RKI/DVV		✓		

* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)
 ** gelistet in der 5 Min.-Spalte der VAH-Liste



Desinfektionsschaum

Zusammensetzung

In 100 g Lösung sind enthalten:
0,50 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid,
0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gemäß nationaler Richtlinien.

Produktdaten	
Produkt	Art.-Nr.
250 ml Schaumsprühflasche	MCHE970
1 L Flasche	MCHE971
5 L Kanister	MCHE972

www.medichem-online.de

Stand 02/2022
Desinfektionsmittel sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

CE0482

