



Flow Wipes free

Alkoholfreie Desinfektionstücher zur Schnelldesinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten sowie Flächen aller Art.



Produktbeschreibung

Flow Wipes free sind alkoholfreie, gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur Schnelldesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art in der Routinedesinfektion.

Flow Wipes free lassen sich einzeln aus der wiederverschließbaren Packung entnehmen.

Anwendungsgebiete

Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR):
Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen medizinischen Inventar und Flächen aller Art.

Gem. EU-Medizinprodukteverordnung:
Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen nichtinvasiven Medizinprodukten.

Medizinprodukte, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit dem Körper in Kontakt kommen, nach Ablauf der Einwirkzeit 15 Sek. unter fließendem Wasser geeigneter Qualität spülen.

Die Haltbarkeit nach Anbruch der Packung beträgt 3 Monate.

Anwendung und Hinweise

Flächen mit **Flow Wipes free** bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gemäß nationaler Richtlinien.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten			30 s	1 min	2 min
Bakterien und Hefen					
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion Bakterizid, levurozid*	VAH**/ EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung		✓	
Behüllte Viren					
begrenzt viruzid	RKI/DVV	inkl. HBV/HIV/HCV	✓		
	EN 14476	hohe und niedrige Belastung		✓	
Ergänzende Prüfergebnisse					
wirksam gegen Papova/SV40 - Viren	EN 14476	hohe Belastung			✓
wirksam gegen Rotaviren	RKI/DVV		✓		
Ergänzende Prüfergebnisse					
Bakterizid	EN 1040			✓	
	EN 13727	hohe Belastung		✓	
levurozid (C. albicans)	EN 1275			✓	
	EN 13624	hohe Belastung		✓	

* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche).

** gelistet in der 5 Min.-Spalte der VAH-Liste.





Flow Wipes free

Zusammensetzung

In 100 g Lösung sind enthalten:
0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid
0,5 g Alkyl (C 12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid

Listungen / Gutachten

Gelistet in der aktuellen Desinfektionsmittelliste des VAH.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne Unterlagen zu unseren vollumfänglich begutachteten Produkten zur Verfügung.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. **BEI KON-TAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Produktdaten			
Produkt	Inhalt	Größe	Art.-Nr.
Flow Wipes free	80 Tücher	20 x 22 cm	MCHE9920

www.medichem-online.de

Stand 02/2022
Desinfektionsmittel sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

CE0482