



# Flow Wipes sensitive

Alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion



## Produktbeschreibung

**Flow Wipes sensitive** sind alkoholische, gebrauchsfertige Tücher zur materialchonenden Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und medizinischem Inventar und Flächen aller Art in patientennahen Bereichen.

**Flow Wipes sensitive** bieten bei der Desinfektion und Reinigung von mittelgroßen Flächen eine universelle und zeitsparende Anwendung. Die Tücher lassen sich einzeln aus der praktischen Packung mit wiederverschließbarem Deckel entnehmen.

## Anwendungsgebiete

Gemäß *Biozidprodukte-Verordnung (BPR)*:  
Schnelldesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art

Gem. *EU-Medizinprodukteverordnung*:  
Schnelldesinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten, insbesondere auch für empfindliche Flächen von Medizinprodukten.

## Anwendung und Hinweise

Fläche mit **Flow Wipes sensitive** abwischen. Hierbei auf vollständige Benetzung achten und Einwirkzeit einhalten.

Die Haltbarkeit nach Anbruch der Packung beträgt 42 Tage. Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Fachkunde gemäß nationaler Richtlinien

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten			30 s	1 min	2 min	3 min
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid*	VAH/ EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung			✓	
tuberkulozid (M. Terraе)	EN 14348	niedrige Belastung	✓			
mykobakterizid (M. avium)	EN 14348	niedrige Belastung		✓		
Viren						
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	niedrige Belastung				✓
begrenzt viruzid	EN 14476	niedrige und hohe Belastung	✓			
	RKI/DW	inkl. HBV/HIV/HCV		✓		
wirksam gegen Rotaviren	EN 14476	niedrige Belastung	✓			
Ergänzende Prüfergebnisse						
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476	niedrige Belastung		✓		
		hohe Belastung	✓			
wirksam gegen Adenoviren	EN 14476	niedrige Belastung				✓
Bakterizid	EN 13727	hohe und niedrige Belastung		✓		
levurozid (C. albicans)	EN 13624	hohe und niedrige Belastung		✓		

\*einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche).

\*\*gelistet in der 5 Min.-Spalte der VAH-Liste.





# Flow Wipes sensitive

## Zusammensetzung

In 100 g Lösung sind enthalten:  
45 g Ethanol

## Listungen / Gutachten

Gelistet in der aktuellen Desinfektionsmittelliste des VAH.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne Unterlagen zu unseren vollumfänglich begutachteten Produkten zur Verfügung.

## Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Produkt Daten			
Produkt	Inhalt	Größe	Art.-Nr.
Flow Wipes sensitive	80 Tücher	20 x 22 cm	MCHE9910

[www.medichem-online.de](http://www.medichem-online.de)

Stand 02/2022  
Desinfektionsmittel sicher verwenden.  
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

CE0482

