



# Inventarwischtücher

Alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion



### Produktbeschreibung

**medichem Inventarwischtücher** sind alkoholfreie, gebrauchsfertige Tücher zur schnellen Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art im Bereich der Routine.

### Anwendungsgebiete

Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem medizinischen Inventar und Flächen aller Art.

Gem. EU-Medizinprodukteverordnung: Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen nichtinvasiven Medizinprodukten.

### Anwendung und Hinweise

Flächen mit **medichem Inventarwischtücher** bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.

Medizinprodukte, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit dem Körper in Kontakt kommen, nach Ablauf der Einwirkzeit 15 Sek. unter fließendem Wasser geeigneter Qualität spülen.

Haltbarkeit nach Anbruch der Packung: 28 Tage

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten			30 Sek.	1 Min.	2 Min.
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid *	VAH **/ EN 16615	hohe Belastung		✓	
Behüllte Viren					
begrenzt viruzid	RKI/DVV	inkl. HBV/HIV/HCV	✓		
	EN 14476	niedrige Belastung	✓		
Ergänzende Prüfergebnisse					
wirksam gegen Papova/SV40 - Viren	EN 14476	hohe Belastung			✓
wirksam gegen Rotaviren	RKI/DVV		✓		
bakterizid	EN 1040	Basistest		✓	
levurozid (C. albicans)	EN 1275	Basistest		✓	
bakterizid (medizinischer Bereich)	EN 13727	hohe Belastung		✓	
levurozid (C. albicans, medizinischer Bereich)	EN 13624	hohe Belastung		✓	
bakterizid (Lebensmittel/Industriebereich)	EN 1276/ EN 13697	hohe Belastung		✓	
levurozid (C. albicans, Lebensmittel/Industriebereich)	EN 1650/ EN 13697	hohe Belastung		✓	

\* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

\*\* gelistet in der 5 Min.-Spalte der VAH-Liste



# Inventarwischtücher

## Zusammensetzung

In 100 g Lösung sind enthalten:  
0,50 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid,  
0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid.

## Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gemäß nationaler Richtlinien.

Produktdaten	
Produkt	Art.-Nr.
Feuchttuchspender 100 Tücher	MCHE966
Nachfüllpack 100 Tücher	MCHE951

[www.medichem-online.de](http://www.medichem-online.de)

Stand 01/2022  
Desinfektionsmittel sicher verwenden.  
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

CE0482

