



Tücherrolle

Vliestuchspender

Produktbeschreibung

medichem Tücherrolle ist ein Mehrweg-Vliestuchspendersystem zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art. **medichem Tücherrolle** besteht aus jeweils einem Mehrweg-Vliestuchspender sowie entsprechenden Vliestuchrollen zum Nachfüllen. Sie können sowohl in Kombination mit gebrauchsfertigen Schnelldesinfektionsmitteln als auch mit der gebrauchsfertigen Anwendungslösung von Desinfektionsmittelkonzentraten verwendet werden und bieten somit eine hohe Flexibilität. Die Vliestücher sind aus qualitativ hochwertigem, fusselfreiem Vliesstoff. Auf Grund der quervernetzten Struktur sind **medichem Tücherrollen** Vliestücher sehr strapazierfähig und besonders reißfest.

Anwendungsgebiete

Wiederbefüllbares Vliestuchspendersystem zur Tränkung, hygienischer Aufbewahrung und Anwendung mit geeigneten Flächendesinfektionsmitteln zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten, medizinischem Inventar oder Flächen aller Art.

Anwendung und Hinweise

Zur Verwendung mit gebrauchsfertigen oder nach Herstellerangaben angesetzten Desinfektionsmitteln. Flächen mit der getränkten **medichem Tücherrolle** bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.

Anwendungsbeschreibung

Befüllung:

Deckel des Vliestuchspenders entfernen und mit der Außenseite auf der Arbeitsfläche ablegen. Trockene Vliestuchrolle aus der Verpackung entnehmen und in den Vliestuchspender einsetzen (Alternativ: Bereits vorgetränkte Tücher mit dem Beutel einsetzen). Beim Verschließen der Entnahmeöffnung darauf achten, dass das herausgezogene Tuch vollständig vom Schutzdeckel umschlossen ist. Beigefügtes Deckeletikett mit den Ansatzinformationen vollständig ausfüllen und auf dem Deckel anbringen. Nach 30 Minuten sind die Tücher einsatzbereit. Das erste Tuch verwerfen. Vor jeder Wiederbefüllung einer medichem Tücherrolle Mehrweg-Vliespenders ist eine vorbeugende Reinigung und Desinfektion erforderlich. Neben möglichen chemothermischen und thermischen Verfahren ist die manuelle Aufbereitung möglich. Es wird empfohlen vor der Aufbereitung den Vliestuchspender einer visuellen Kontrolle zu unterziehen. Bei Abnutzungserscheinungen sind Deckel/Vliestuchspender abzutauschen.

Reinigung:

Innenseiten und Rand des neuen oder restentleerten Spenders mit einem Reinigungstuch gründlich reinigen, Deckelinnenseiten, Rand des Deckels, Innenflächen und Ränder der Entnahmeöffnung gründlich reinigen. Deckelaußenseiten und Außenflächen des Spenders gründlich reinigen.

Desinfektion:

Innenseiten und Rand des Spenders mit einem Desinfektionstuch gründlich abwischen. Deckelinnenseiten, Rand des Deckels, Innenflächen und Ränder der Entnahmeöffnung gründlich abwischen. Deckelaußenseiten und Außenflächen des Spenders gründlich abwischen.





Tücherrolle

Produktdaten			
Produkt	Inhalt	Größe	Art.-Nr.
Spendereimer allein	unbefüllt	–	MCHE948
Tücherrolle, fertig getränkt	70 Tücher	24 x 24 cm	MCHE951
Tücherrolle, ungetränkt, Packung mit 3 Rollen	70 Tücher	24 x 24 cm	MCHE949

www.medichem-online.de

Stand 02/2022

Desinfektionsmittel sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

